



# Anesto работает быстрее!

Будущее, наступившее сегодня: внутрикостная анестезия с Anesto



# Применение: Инновационная, щадящая, экономящая ваше время система для введения внутрикостной анестезии

Anesto - новая система для анестезии - была разработана компанией W&H специально для внутрикостных инъекций. Anesto представляет собой наконечник с принадлежностями, позволяющий выполнять направленную, безопасную и достаточно продолжительную местную анестезию.

В отличие от традиционной анестезии с блокадой нерва, внутрикостная инъекция непосредственно в губчатую кость позволяет быстро и мягко подавить чувствительность отдельных зубов. Благодаря направленной инъекции требуются значительно меньшие объемы обезболивающего вещества. Оно начинает действовать уже через минуту. С появлением Anesto привычное, долго не проходящее онемение большой зоны в полости рта, которое наблюдается после других видов инъекционной анестезии, уходит для пациентов в прошлое вместе с ощущением дискомфорта.

## Достоинства внутрикостной анестезии

- > безопасность, мягкость действия, быстрота
- > сокращение времени наступления анестезии перед началом операции благодаря немедленному действию [макс. 1 минута]
- > мгновенное снятие боли
- > малый объем анестезирующего вещества



Введение топикального обезболивающего в выбранное место инъекции



Перфорация костной ткани с заданной скоростью вращения иглы



Медленная инъекция обезболивающего в губчатое вещество кости

# Инструмент: безопасный, эргономичный, экономичный

При создании Anesto особое внимание уделялось безопасности и эргономичности при применении. В итоге данная система проста в работе и удобна в обслуживании.

По сравнению с обычными внутрикостными системами наконечник Anesto значительно меньше, тоньше и легче. Индивидуальную дозу обезболивающего легко задать заранее. Инъекционные иглы идеально подходят к требованиям внутрикостной процедуры. Система Anesto состоит из наконечника, зажима иглы, устройства для смены иглы, защитной втулки (все детали можно стерилизовать) и набора одноразовых игл для инъекций.

## Достоинства системы Anesto

- > безопасность
- > тонкая и эргономичная форма
- > долговечность
- > удобство в управлении

## Наконечник, технические данные



Передаточное число вращения от микромотора:	1,4 : 1
Соединительный разъем мотора по стандарту:	ISO 3964
Частота вращения мотора (об./мин.):	мин. 15 000 – макс. 25 000
Размеры иглы:	Ø 0,55 x 9 мм
Используемые иглы для внутрикостной инъекции:	только иглы для внутрикостных инъекций, разрешенные к применению компанией W&H
Используемые картриджи для шприцов:	1,7 и 1,8 мл (EN ISO 11499) или 2,2 мл
Дозировка:	Одно нажатие дозирующей ручки до упора соответствует инъекции 0,1 мл





Все изображения приводятся только в качестве иллюстраций.  
Дополнительное оборудование и принадлежности  
не входят в комплект поставки.

**Производитель:**

W&H Dentalwerk Bürmoos GmbH  
Ignaz-Glaser-Straße 53, Postfach 1  
5111 Bürmoos, Austria  
t + 43 6274 6236-0  
f + 43 6274 6236-55  
office@wh.com  
wh.com

**Авторизованный дилер:**

